


Instruções de Uso

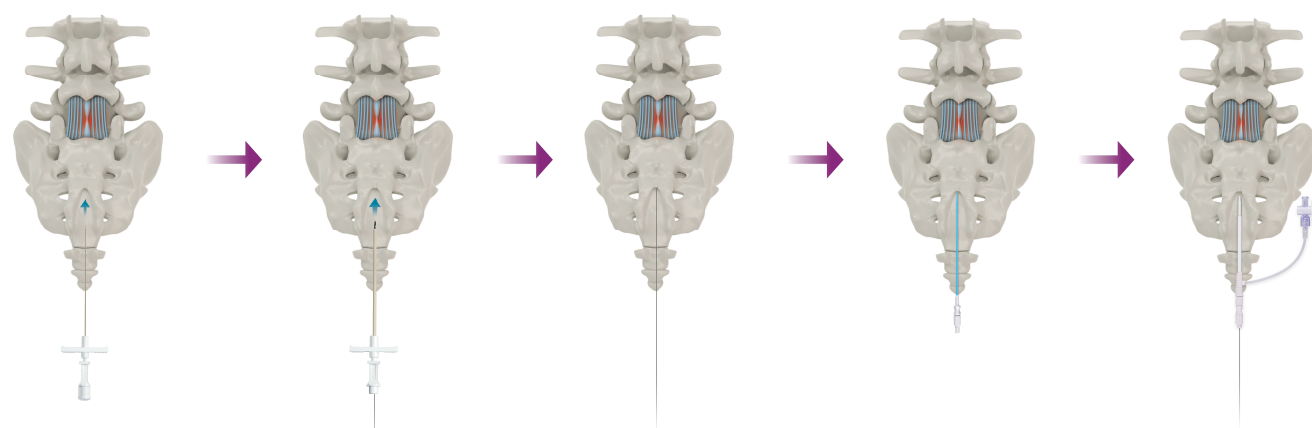

Etapa-A

Inserir uma agulha epidural de calibre 15 (SWVP-30A) através do hiato no espaço epidural da coluna vertebral, acima do cóccix.

Etapa-B

Inserir o Fio-Guia através da agulha epidural.

Etapa-C


Retirar a agulha epidural deixando o Fio-Guia no hiato.

Etapa-D

Inserir o Dilatador sobre o Fio-Guia para o hiato.

Etapa-E

Retirar o Dilatador e insira a Bainha / Estilete no Fio-Guia.

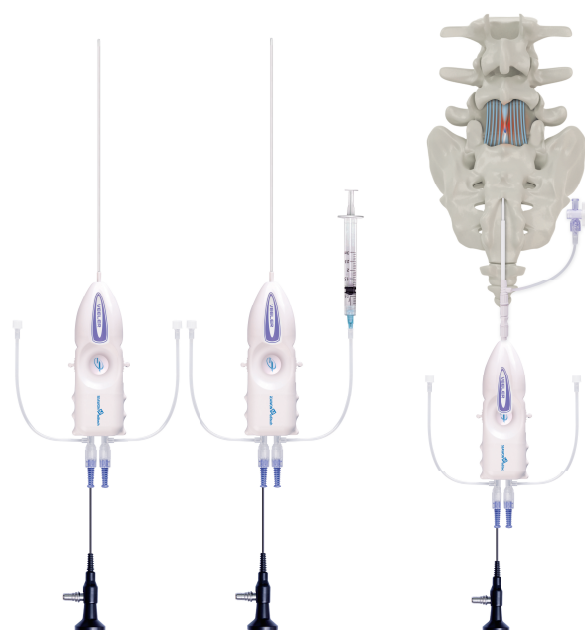

Etapa-F

Inserir um endoscópio flexível dentro do V-cateter até atingir o final do canal. Preencher o V-cateter, utilizando uma seringa com solução salina.

Etapa-G

Retirar o Fio-Guia e inserir o V-cateter no local do tratamento.

Etapa-H

Verificar a posição exata do V-cateter através do C-Braço. Injetar o medicamento nas áreas almejadas.

VEEELER

Cateter Epidural Dirigível com Video

Diagnóstico e Procedimento Cirúrgico no Espaço Epidural
Compatível com procedimentos de Laser (SELD e ELND) / Radiofrequência
Minimamente Invasivo
Recuperação Acelerada



