

ST.REED[®]PULSE

Cânula de Bloqueio Dirigível com Ponta Ativa
para Neuroestimulação e Modulação Ganglionar

ST.REED[®]PULSE

Cânula de Bloqueio Dirigível com Ponta Ativa
para Neuroestimulação e Modulação Ganglionar

- Minimamente Invasivo
- Recuperação Acelerada

SEAWON^Meditech

Fabricado Por:

Seawon Meditech Co., Ltd.
33, Bucheon-ro 298 beon-gil,
Wonmi-gi, Bucheon-si, Gyeonggi-do,
Zip Code 14487, Coreia do Sul
Tel: +82 32 684 7071~4
www.seawonmt.com



Importado Por:

Blumédical Group Comércio de Produtos para Saúde Ltda.
Rua Comendador Araújo, 143 - Conj. 32 - Centro
80420-000 Curitiba - PR, Brasil Brasil
Tel: (41) 3095-0777
email: contato@blumédical.com.br
www.blumédical.com.br

Anvisa nº 80981940020


ST.REED[®]PULSE-Cd, 24/06/2019

 SEAWON^Meditech

Descrição do Produto

St. Reed Pulse é um dispositivo multifuncional indicado para tratamentos farmacológicos, descompressão percutânea e modulação / estimulação da estrutura nervosa, da raiz dorsal e dos gânglios da raiz dorsal para tratar pacientes sintomáticos com dor neuropática espinhal, radiculopatias espinhais, síndrome pós-laminectomia (SPL), síndrome pós-herpética, lombalgia crônica e síndrome dolorosa regional complexa (SDRC).

É indicado também para o teste de EME (Estimulação da Medula Espinhal). A ponta ativa da cânula possui um par termoeletrico que fornece controle de temperatura inferior a 42° C para proteger o tecido mole e o nervo. O St.Reed Pulse é compatível com equipamentos de alta frequência com capacidade de saída de 50 w ou mais e possui modo de operação monopolar.

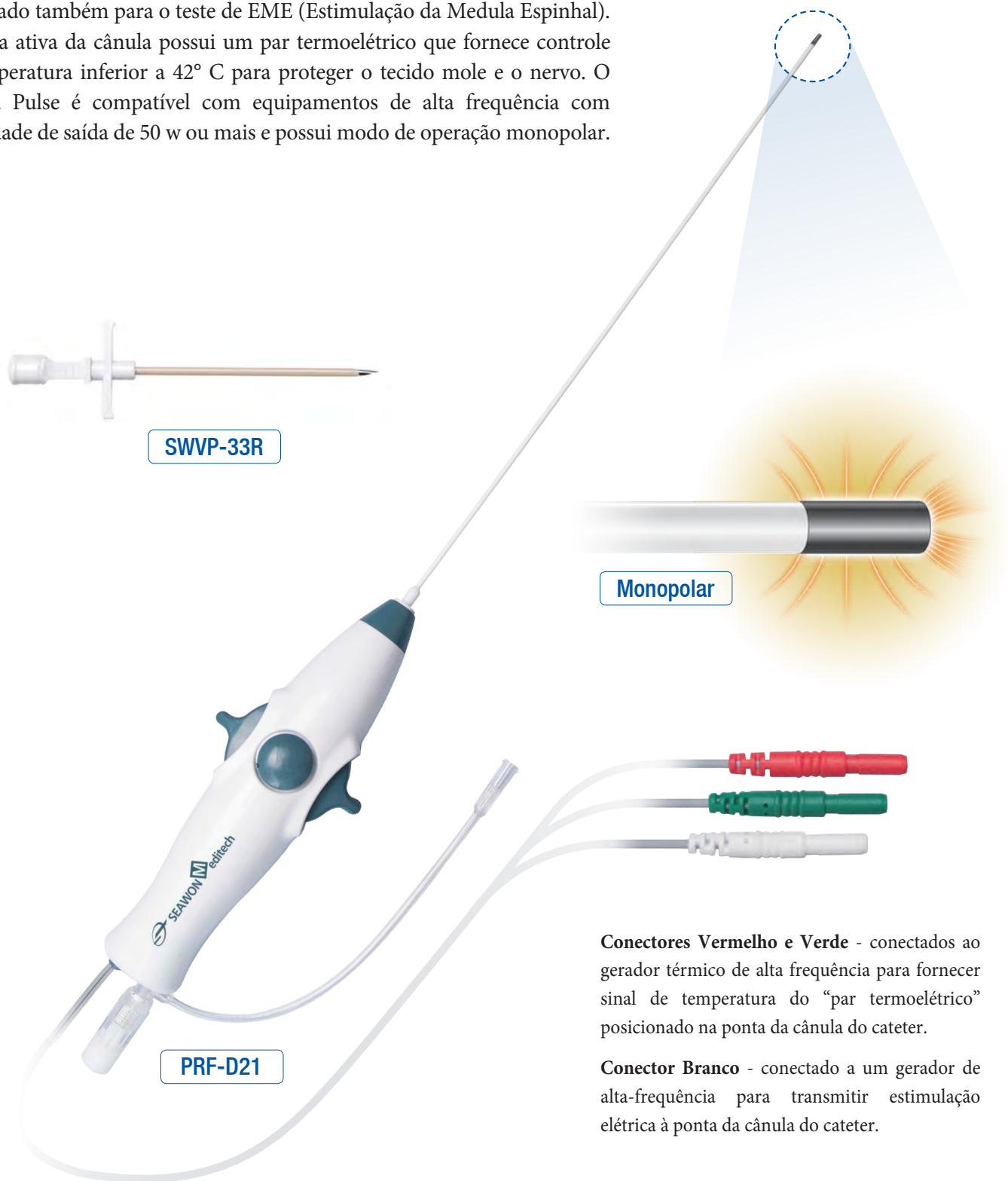

Conectores Vermelho e Verde - conectados ao gerador térmico de alta frequência para fornecer sinal de temperatura do “par termoeletrico” posicionado na ponta da cânula do cateter.

Conector Branco - conectado a um gerador de alta-frequência para transmitir estimulação elétrica à ponta da cânula do cateter.

Características

- Atua bidirecionalmente
- Ponta distal dirigível e de fácil manipulação
- Visível em fluoroscopia no espaço epidural (Radiopaco)
- Controle altamente preciso com botão para travar/destravar
- Orientação de estimulação com conexão de gerador
- RF pulsado com temperatura controlada
- Possibilidade de tratar múltiplas raízes nervosas
- Injeção de contraste para raio-X e aspiração com tubo de injeção integrado
- Não há necessidade de retirar o Fio-Guia para injetar os medicamentos

Vantagens

- Terapia de risco reduzido
- Minimamente Invasivo
- Sem anestesia geral
- Elevadas taxas de sucesso
- Sem formação de cicatriz
- Sem cirurgia aberta
- Tempo de hospitalização reduzido
- Recuperação acelerada
- Pode ser repetido
- Ideal para pacientes já submetidos a cirurgias anteriores
- Tratamento focado na raiz do problema



Indicações

- Dor neuropática espinhal
- Radiculopatia da coluna vertebral
- Síndrome Pós-Laminectomia (SPL)
- Síndrome pós-herpética
- Lombalgia crônica
- Dor discogênica lombar
- Síndrome Dolorosa Regional Complexa (SDRC)
- Estimulação da Medula Espinhal (EME)

Contraindicações

- Gravidez
- Infecções
- Doença Mental
- Crianças
- Idosos
- Distúrbios de coagulação ou tratamento com anticoagulantes

Informação do Produto

Código	Compo l c l rcq	Descrição	Ory
PRF-D21-N	PRF-D21	Cateter Dirível com Ponta Ativa	1
	SWVP-33R	Cânula Introdutora	1