



SPASY™

Kit Cânula para Vertebroplastia


Indicações

- VCF (Fratura por Compressão Vertebral) Causada por Osteoporose
- Fratura Osteolítica
- Fraturas Ósseas Metastáticas

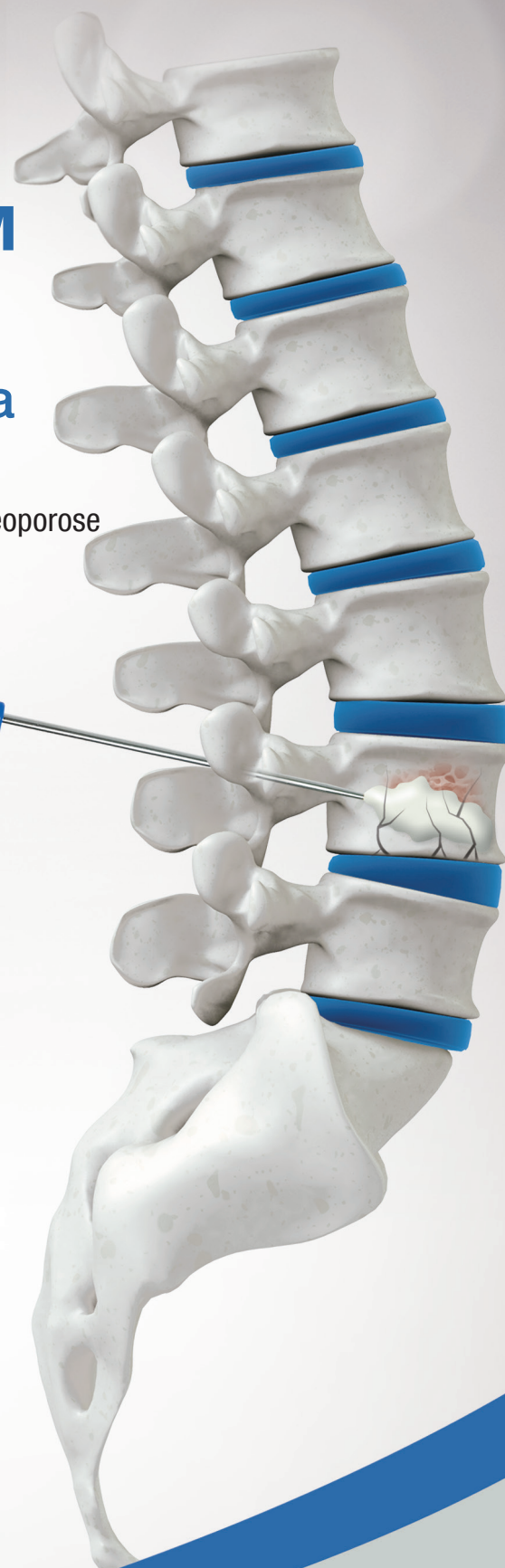


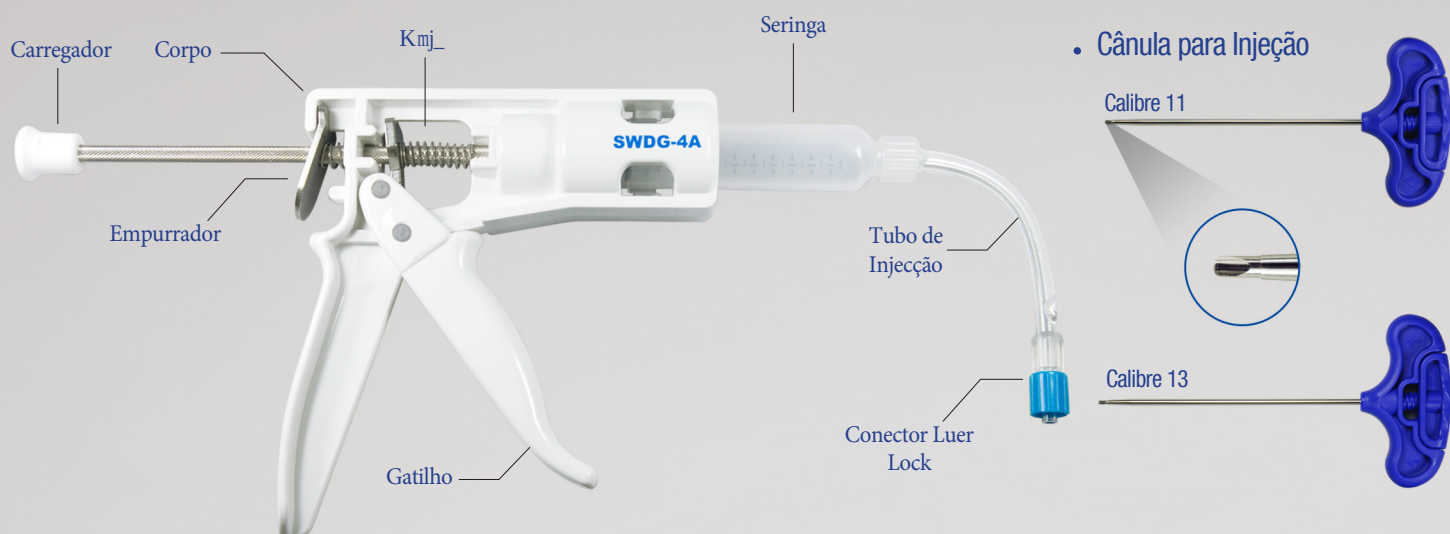

Etapa-1

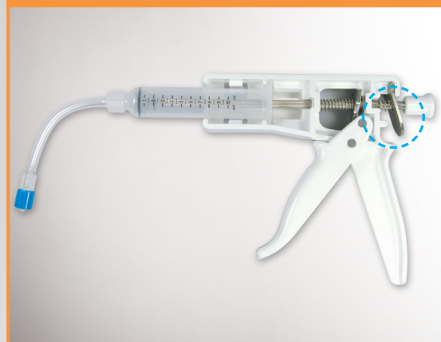

Empurre o empurrador para puxar o pistão e remover a seringa.

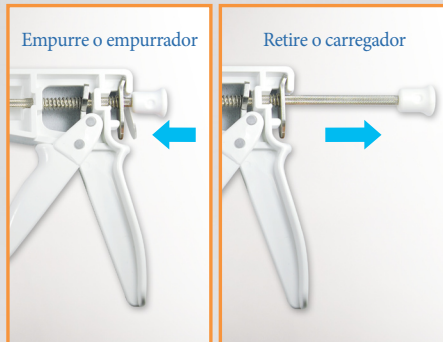

Etapa-2



Despeje o cimento ósseo cuidadosamente para dentro da seringa inclinando-a para o lado.

Etapa-3



Conecte a seringa e gire-a para a direita até que o som de "click" seja audível. Em seguida, puxe o gatilho para remover o ar de dentro da seringa.

Etapa-4



Conecte o Tubo de Injeção com a Cânula. Prenda a alça e puxe o gatilho lentamente para pressionar o êmbolo na seringa e empurrar cuidadosamente o cimento ósseo no corpo vertebral através da Cânula para Injeção até que a quantidade desejada de cimento ósseo seja injetada.

*Obs: Cada puxada de gatilho injeta 0,5 mL de cimento ósseo.

Informação do Produto

Código	Descrição	Qtd.
SWM-KIT-T4	Pistola para Injeção de Cimento	1 Unid.
	Cânula para Injeção (SWVP-11A)	2 Unid.

*Outros modelos disponíveis sob encomenda

Código	Calibre	Comprimento
SWVP-11A	11	125mm

Fabricado Por:



Seawon Meditech Co., Ltd.
33, Bucheon-ro 298 beon-gil,
Wonmi-gi, Bucheon-si, Gyeonggi-do,
Zip Code 14487, Coreia do Sul
Tel: +82 32 684 7071~4
www.seawonmt.com

Importado Por:



Blumédical Group Comércio de Produtos para Saúde Ltda.
Rua Comendador Araújo, 143 - Conj. 32 - Centro
80420-000 Curitiba - PR, Brasil
Tel: (41) 3095-0777
email: contato@blumédical.com.br
www.blumédical.com.br