

Etapa-1



Enchendo o Cilindro de Contraste



Puxe a manivela do Expansor do Balão (SWMP) para encher o cilindro com aproximadamente 20 cm³ de contraste. Então, coloque o botão de trava e destrava na posição de “travado”.

Etapa-2



O botão de trava e destrava do Expansor do Balão (SWMP) deve-se manter “travado”. Gire a manivela para a direita até a marcação “0” para remover o ar do cilindro.

Etapa-3



Conectando o Cateter Balão / Removendo o Ar Residual do Sistema Remova a embalagem do Cateter Balão (SWS10 ou SWS15 ou SWS20). A válvula de 3 vias direciona para a abertura da via em “Desligado”.



Inflando e Desinflando o Balão

Etapa-4



Insira o Cateter Balão no corpo vertebral e gire a manivela do Expansor do Balão (SWMP) para a direita. O balão então inflará.

Etapa-5



Para retirar o ar do Cateter Balão (SWS10 ou SWS15 ou SWS20), mova o botão de trava e destrava da posição “travado” para “destravado”. Puxe a manivela do Cateter Balão e gire o botão de trava e destrava para a posição “travado”.

Modelo do Produto

Código	Descrição	Código	Descrição
SPASY10-1C	Unilateral 10mm	SPASY10-2A	Bilateral 10mm
SPASY15-1C	Unilateral 15mm	SPASY15-2A	Bilateral 15mm
SPASY20-1C	Unilateral 20mm	SPASY20-2A	Bilateral 20mm

Informação do Produto

Componentes	Código	Qtd Unilateral	Qtd Biilateral
Cateter Balão 10mm / 15mm / 20mm	SWS10 / SWS15 / SWS20	1	2
Expansor do Balão	SWMP	1	2
Cânula de Acesso Percutâneo	SWMVP	1	2
Fio Guia	SWM-1	1	2
Cânula de Trabalho	SWM-2	1	2
Broca para Osso	SWM-3	1	1
Cânula para Preencher com Cimento	SWM-4	4	6

Especificações do Balão

Especificação	Código	Comprimento Inicial (mm)	PSI Máximo	Diâmetro Máximo (mm)	Comprimento Máximo (mm)	Volume Máximo (cc)
10mm	SWS10	12,7	440	17	17	4
15mm	SWS15	16,3	440	16,3	19	4
20mm	SWS20	19,2	440	18,5	25	6

SPASY Cânula para Biópsia Óssea (Acessório)

Código	Descrição	Quantidade
JMSWBS-9B	Cânula e Empurrador	1 Unid.



Fabricado Por:

Seawon Meditech Co., Ltd.
33, Bucheon-ro 298 beon-gil,
Wonmi-gi, Bucheon-si, Gyeonggi-do,
Zip Code 14487, Coreia do Sul
Tel: +82 32 684 7071 ~4
www.seawonmt.com



Importado Por:

Blumедical Group Comércio de Produtos para Saúde Ltda.
Rua Comendador Araújo, 143 - Conj. 32 - Centro
80420-000 Curitiba - PR, Brasil
Tel: (41) 3095-0777
email: contato@blumедical.com.br
www.blumедical.com.br

SPASY™

Kit Cânula para Cifoplastia

Indicações

- VCF (Fratura por Compressão Vertebral) Causada por Osteoporose
- Fratura Osteolítica
- Fraturas Ósseas Metastáticas

SPASY™

SWMP Expansor do Balão

Característica Especial

O Manômetro indica a pressão do balão. O botão de trava e destrava ajuda a controlar a compressão e descompressão do aparelho.



SPASY™

SWS10/15/20 Cateter Balão



SWMVP

Cânula de Acesso Percutâneo




SWM-1

Fio Guia



SWM-2

Cânula de Trabalho

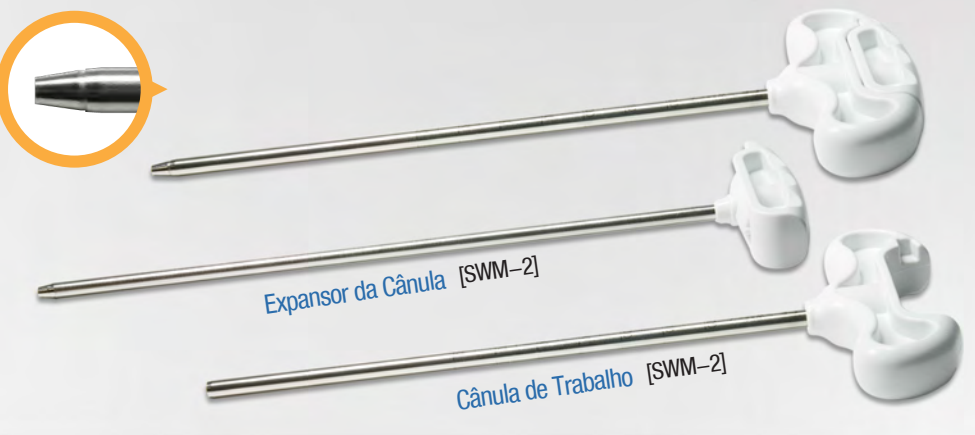


SWM-3

Broca para Osso




SWM-4

Cânula para Preencher com Cimento

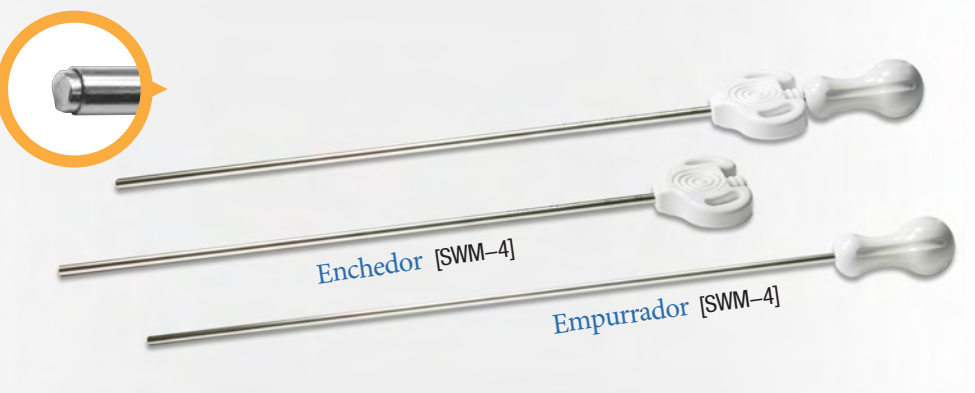

SPASY™


Técnica Cirúrgica - Sistema Para Acesso Ósseo

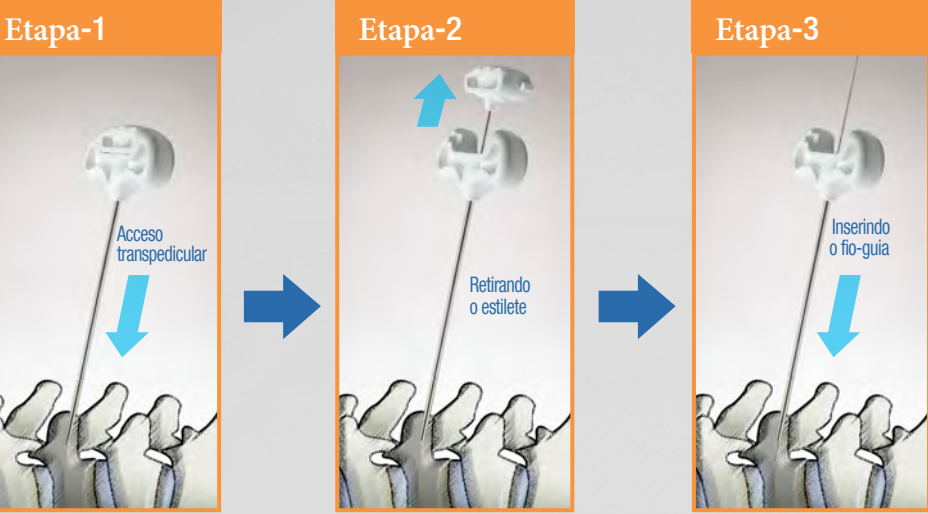

Realize o acesso transpedicular com a Cânula de Acesso Percutâneo (SWMVP) cerca de 5 mm para dentro do corpo vertebral.

Retire o estilete de dentro da Cânula de Acesso Percutâneo (SWMVP).

Insira o Fio Guia (SWM-1).

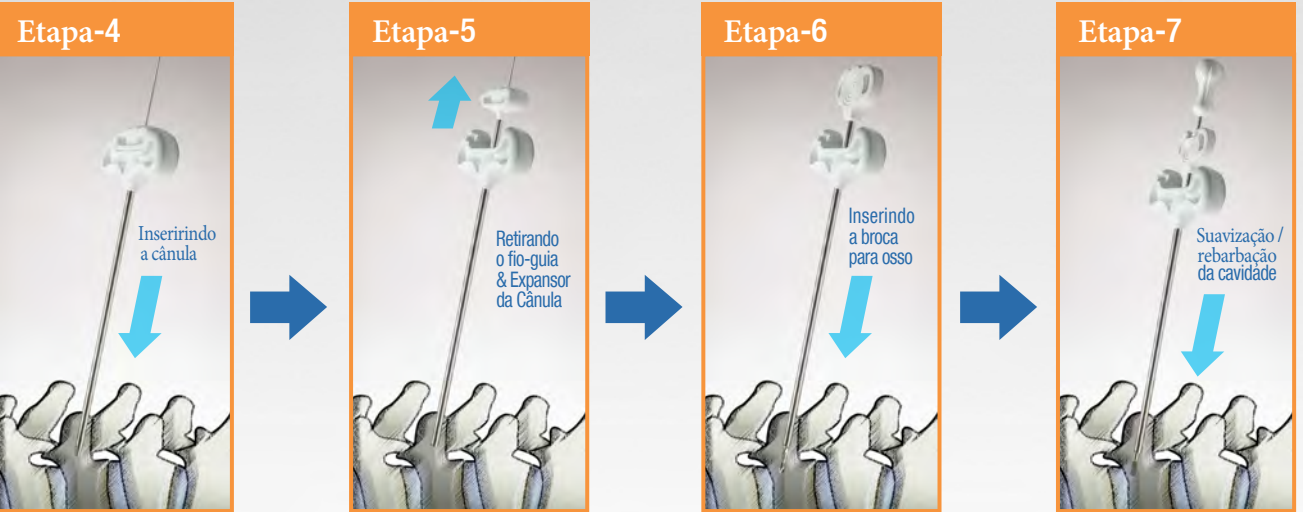

Retire a Cânula de Acesso Percutâneo (SWMVP) do corpo vertebral, insira a Cânula de Trabalho (SWM-2) sobre o Fio Guia (SWM-1) para dentro do corpo vertebral.

Retire o Fio Guia (SWM-1) & Expansor da Cânula (SWM-2). Apenas a Cânula de Trabalho (SWM-2) permanece no corpo vertebral.

Insira a Broca Para Osso (SWM-3) na Cânula de trabalho e abra espaço no corpo vertebral para a colocação do Cateter Balão. Verifique o C-braço e assegure que o lúmen da cânula de trabalho esteja livre de partículas de osso.

Mova o Preenchedor de Cimento (SWM-4) para trás e para a frente através da Cânula de Trabalho (SWM-2) várias vezes para impedir que o balão exploda devido a possíveis fragmentos de ossos afiados. O Preenchedor de Cimento (SWM-4) deve ser então removido.