

SIMC

Cânula Dirigível para Bloqueio Terapêutico Cervical

Modo de Uso

- A** Preparar o paciente para procedimento;
 - Posicionar o paciente inclinado na mesa de operação.
- B** Girar o equipamento Arco em C para a posição lateral para melhor visualização do local da punção do paciente.
- C** Colocar o avental no paciente com abertura ao redor do local da punção.
- D** Proceder com anestesia local no paciente no local da punção.
- E** A Cânula Introdutora é inserida no local da punção.
- F** Remover o Estilete e deixar a Cânula no local como guia.
- G** Inserir a Cânula Dirigível através da Cânula no espaço epidural até o local de tratamento desejado, guiando sob orientação do equipamento Arco em C.
- H** Verificar a posição da Cânula Dirigível utilizando o Arco em C.
- I** Administrar fluidos e medicamentos através da Porta de infusão da Cânula Dirigível seguindo as recomendações e necessidades médicas.
- J** Quando o procedimento for finalizado, remover conjuntamente a Cânula Dirigível e Cânula do paciente.



Fabricado Por:
Seawon Meditech Co., Ltd.
33, Bucheon-ro 298 beon-gil,
Wonmi-gi, Bucheon-si, Gyeonggi-do,
Zip Code 420-803, Coreia do Sul
Tel: +82 32 684 7071~4
www.seawonmt.com



Importado Por:
Blumedical Group Comércio de Produtos para Saúde Ltda.
Rua Comendador Araújo, 143 - Conj. 32 - Centro
80420-000 Curitiba - PR, Brasil Brasil
Tel: (41) 3095-0777
email: contato@blumedical.com.br
www.blumedical.com.br

Anvisa nº 80981940045

SIMC-CdL 29/05/2023




SIMC

Cânula Dirigível para Bloqueio
Terapêutico Cervical



O Kit Cânula Dirigível para Bloqueio Terapêutico Cervical – SIMC é um dispositivo médico utilizado para a injeção de medicamentos e soluções diretamente no local suspeito de lesão/inflamação no espaço epidural/foraminal para pacientes que sofrem de dor crônica nas costas, síndrome pós-laminectomia, estenose espinhal e hérnia de núcleo pulposo. O medicamento reduz a inflamação e a dor e é introduzido diretamente no local da lesão utilizando o equipamento Arco em C.

O Kit Cânula Dirigível para Bloqueio Terapêutico Cervical – SIMC é dirigível e unidirecional e pode ser utilizado para romper fibrose do paciente mecanicamente, hidraulicamente ou quimicamente.

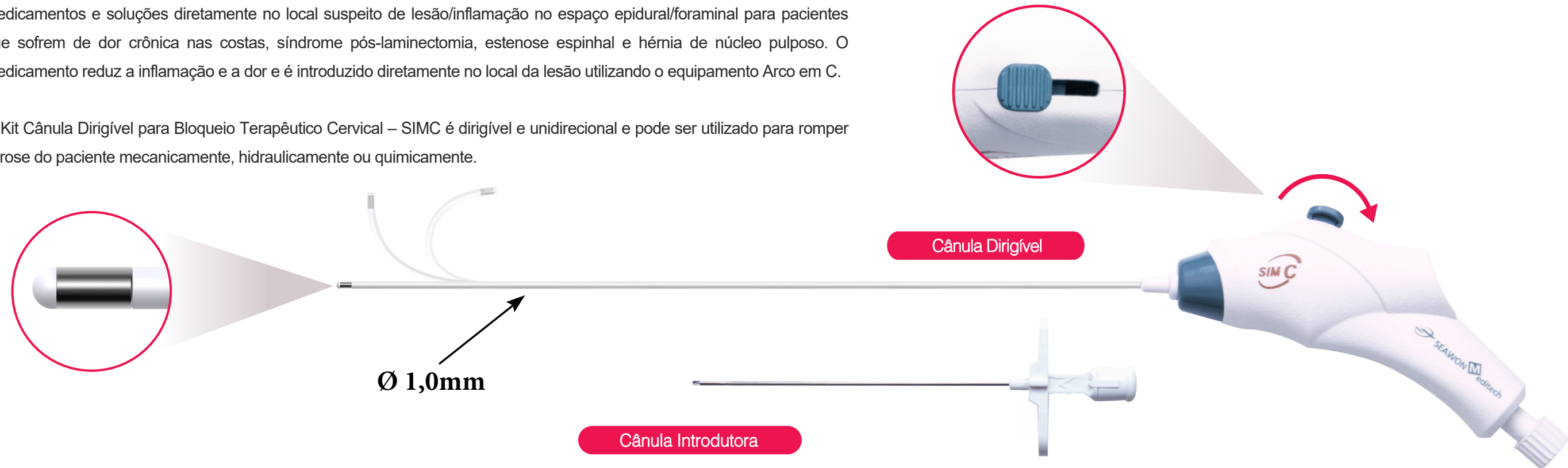

Indicações

- Dor crônica nas costas
- Síndrome pós-laminectomia
- Estenose espinhal
- Hérnia de núcleo pulposo

Características

- Única cânula do mundo de bloqueio cervical dirigível (unidirecional).
- Ponta distal dirigível de (Ø) 1,0mm
- Mais fácil para injetar o medicamento comparado com St. Cox
- Radiopaco para imagens distintas e precisão no posicionamento

Informação do Produto

Modelo Comercial	Cânula Dirigível	Cânula Introdutora	Cânula Dirigível		Cânula Introdutora	
			Comp. (mm)	Diam. (mm)	Comp. (mm)	Diam. (mm)
SWC24	SWCATH22	SWVP-21C	200	Ø 1,0	90	Ø 1,5

Vantagens

- Terapia de risco reduzido
- Sem cirurgia aberta
- Pode ser repetido
- Tempo de hospitalização reduzido e com recuperação acelerada
- Ideal para pacientes já submetidos a cirurgias anteriores
- Tratamento focado na raiz do problema
- Sem anestesia geral
- Sem formação de cicatrizes