



## Procedimento Cirúrgico


### I Realize a punção na área do tratamento utilizando a Agulha

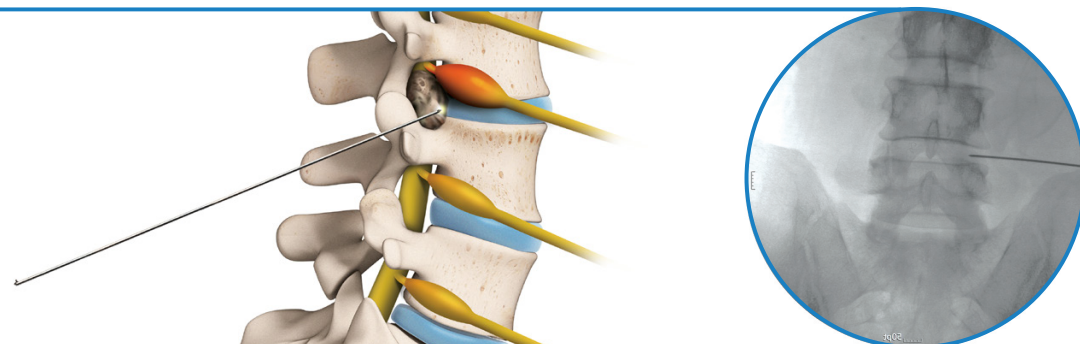

### II Insira a Cânula Dilatadora sob a Agulha e depois a Cânula Guia sob a Cânula Dilatadora

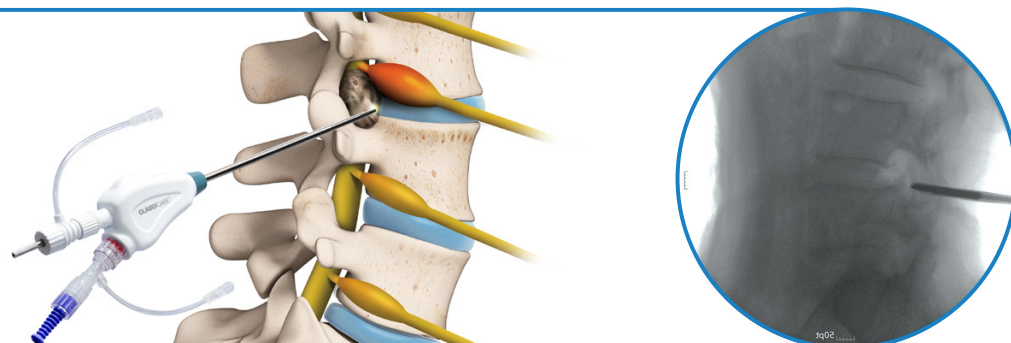

### III Insira a Cânula Dissectora para remover o material com a ponta rotativa

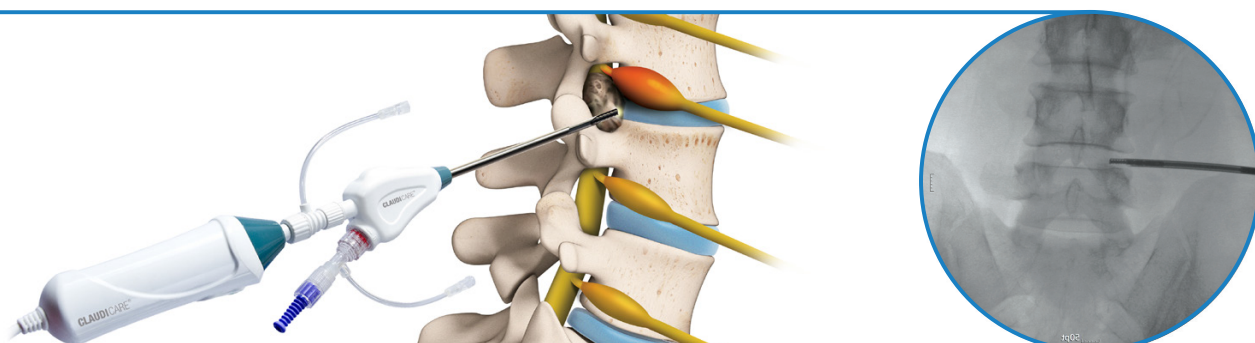

# CLAUDICARE®

Kit Cânula Descartável




O Kit C nula Descart vel - CLAUDICARE   um produto de uso  nico, fornecido est ril e indicado nos procedimentos percut neos de descompress o para tratamento de estenose foraminal lombar, estenose central lombar, dor lombar cr nica, pacientes que se recusam a operar ou s o inoper veis, ou ainda, que realizaram bloqueio radicular diagn stico, mas n o obtiveram al vio de longo prazo.

O Kit C nula Descart vel - CLAUDICARE   usado para alargar o forame intervertebral, aproximando-se da proximidade imediata da parte lesada por meio da via transforaminal e removendo a les o (ligamento, disco, osso, tecido mole, etc.) por meio de uma incis o menor sob anestesia local.

O produto tamb m pode ser utilizado em procedimentos de endoscopia da coluna (atrav s do endosc pio).

## Indica  o

- Estenose foraminal lombar;
- Estenose central lombar;
- Dor cr nica nas costas;
- Pacientes que recusam opera  o aberto ou pacientes inoper veis;
- Pacientes diagnosticados com bloqueio de nervo e sem al vio a longo prazo.

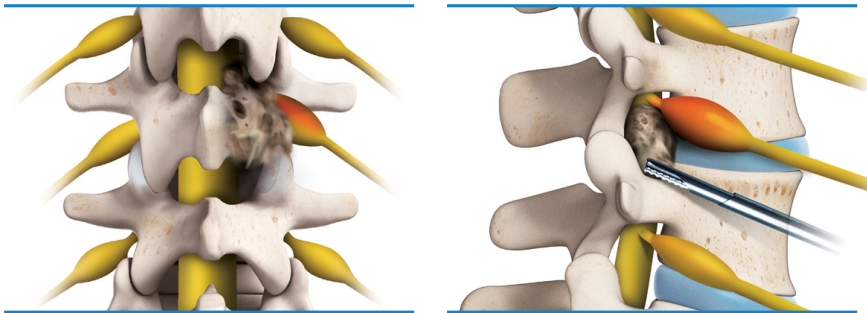

## Especifica  es

| Modelo |                   | SWCLD-EP-LN1                                                                        |              | SWCLD-EP-SN1                                                                        |              | SWCLD-EP-LN2                                                                        |              | SWCLD-EP-SN2                                                                          |              | SWCLD-EP-SN3                                                                          |              |
|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1      | Canula Guia       | SWCLD-EC-05                                                                         |              | SWCLD-EC-02                                                                         |              | SWCLD-EC-05                                                                         |              | SWCLD-EC-02                                                                           |              | SWCLD-EC-06                                                                           |              |
|        |                   | Comprimento (mm)                                                                    | Diâmetro (Ø) | Comprimento (mm)                                                                    | Diâmetro (Ø) | Comprimento (mm)                                                                    | Diâmetro (Ø) | Comprimento (mm)                                                                      | Diâmetro (Ø) | Comprimento (mm)                                                                      | Diâmetro (Ø) |
|        |                   | 200                                                                                 | 4,1          | 120                                                                                 | 4,1          | 200                                                                                 | 4,1          | 120                                                                                   | 4,1          | 100                                                                                   | 4,1          |
| 2      | Cânula Dissectora | SWCLD-ET-07                                                                         |              | SWCLD-ET-03                                                                         |              | SWCLD-ET-06                                                                         |              | SWCLD-ET-05                                                                           |              | SWCLD-ET-08                                                                           |              |
|        |                   |  |              |  |              |  |              |  |              |  |              |
|        |                   | Comprimento (mm)                                                                    | Diâmetro (Ø) | Comprimento (mm)                                                                    | Diâmetro (Ø) | Comprimento (mm)                                                                    | Diâmetro (Ø) | Comprimento (mm)                                                                      | Diâmetro (Ø) | Comprimento (mm)                                                                      | Diâmetro (Ø) |
|        |                   | 320                                                                                 | 3,5          | 235                                                                                 | 3,5          | 320                                                                                 | 2,5          | 235                                                                                   | 2,5          | 215                                                                                   | 3,5          |
| 3      | Cânula Dilatadora | SWCLD-DI-04                                                                         |              | SWCLD-DI-03                                                                         |              | SWCLD-DI-04                                                                         |              | SWCLD-DI-03                                                                           |              | SWCLD-DI-05                                                                           |              |
| 4      | Probe             | SWCLD-HK-03                                                                         |              | SWCLD-HK-01                                                                         |              | SWCLD-HK-03                                                                         |              | SWCLD-HK-01                                                                           |              | SWCLD-HK-04                                                                           |              |
| 5      | Agulha            | SWCLD-ND-03                                                                         |              | SWCLD-ND-02                                                                         |              | SWCLD-ND-03                                                                         |              | SWCLD-ND-02                                                                           |              | SWCLD-ND-04                                                                           |              |
| 6      | Console           | SWCLD-CB-01                                                                         |              |                                                                                     |              |                                                                                     |              |                                                                                       |              |                                                                                       |              |

